


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
МИОСТИМУЛЯТОРОМ
ДЛЯ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА
AQUA QUTTO



MYTREX


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ АППАРАТОМ

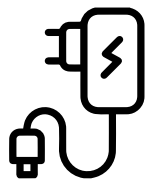

откройте крышку, закрывающую разъем зарядки и подключите зарядное устройство.

Не тяните защитную крышку!

Во время зарядки индикатор мигает, по окончании зарядки - горит непрерывно.

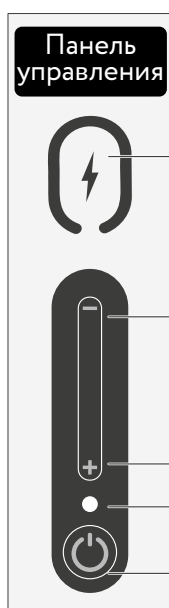

Порт зарядки
закрытый водозащитным колпачком

Кнопка уменьшения уровня
Интенсивность уменьшается с каждым нажатием

Кнопка увеличения уровня
Интенсивность увеличивается с каждым нажатием


LED индикатор
горит или мигает во время использования/зарядки

Кнопка питания
нажмите и удерживайте для включения/выключения

1

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР

- 1 Расположите прибор так, чтобы панель управления была спереди и садитесь на прибор сверху так, чтобы панель управления прибора была спереди между ваших бедер.

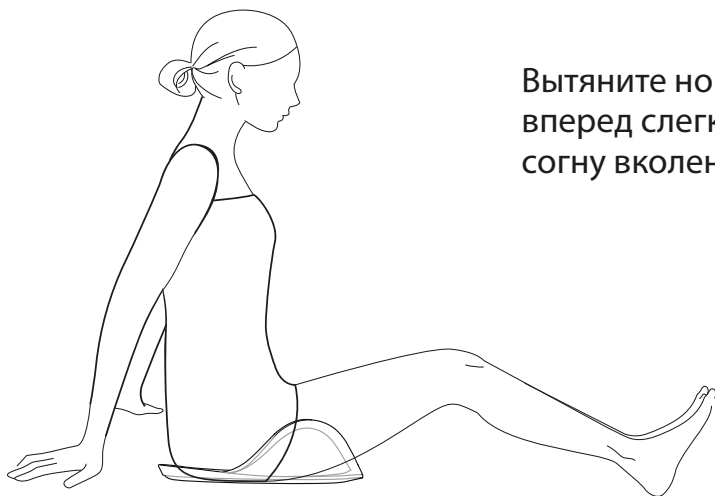


Вытяните ноги вперед слегка согну в колени

- 2 Распрямите верхнюю часть туловища, наклоняя таз вперед, обопритесь на руки. Это улучшает стимуляцию мышц тазового дна.



Сядьте со скрещенными ногами

3

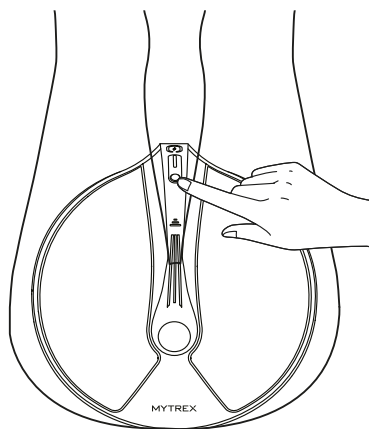

Нажмите и удерживайте кнопку включения около 2 сек.

Прибор завибрирует 2 раза и дважды издаст звук включения.

✓ Убедитесь, что ваша кожа с обеих сторон соприкасается с электродами, находясь в воде.

4


Выбор уровня воздействия

На каждое нажатие кнопки прибор реагирует вибрацией и переключает уровень воздействия на 1. Всего вы можете выбрать 10 уровней.

Уменьшение интенсивности (-)

Увеличение интенсивности (+)

Кнопка «вкл»/«выкл»

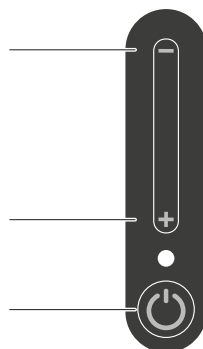

5

Остановка процедуры



Чтобы прервать процедуру во время проведения, нажмите и удерживайте кнопку «вкл/выкл» около 2 сек. Прибор завибрирует и издаст звуковой сигнал.

Прибор отключится автоматически спустя 15 минут после начала процедуры.

УХОД И ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

После того, как вы закончили пользоваться прибором, промойте его проточной водой и протрите чистой сухой тканью.

Аккуратно потрясите устройство вверх и вниз, чтобы удалить остатки воды внутри и закрепите для просушки.

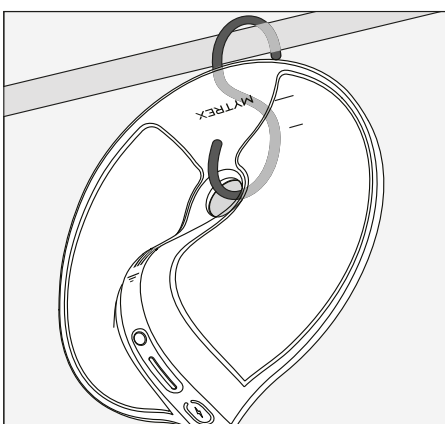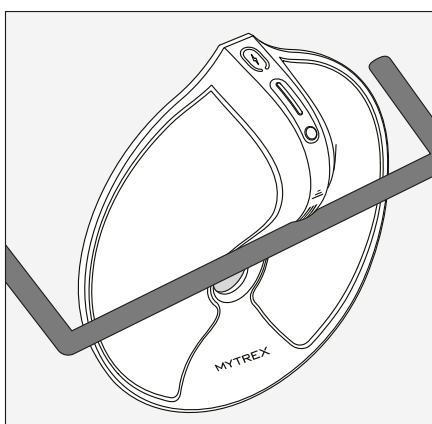

Используйте вешалку для полотенец или крючок, чтобы зацепить прибор за центральное отверстие для просушки.

✓ Не вешайте прибор на полотенцесушитель – высокая температура может повредить устройство.



Для достижения
максимальной эффективности
при использовании
аппарата **ЧЕТКО СЛЕДУЙТЕ
РЕКОМЕНДАЦИЯМ**



Хотите узнать больше
о возможностях
вашего аппарата
и его функциях?
**ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПРОГРАММОЙ КРАСОТЫ,
РАЗРАБОТАННОЙ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС**



Наведите камеру на QR код
и Вы получите видеоинструкцию
и персональную программу
красоты для Вашей кожи
от косметологов Mytrex

