

mesoderm



АППАРАТ

DERMAPEN P19

С ФУНКЦИЕЙ ПОДАЧИ
КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

ДЛЯ
ФРАКЦИОННОЙ
МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ
МЕЗОТЕРАПИИ

 **SMARTBUY**
профессиональная косметика · оборудование · мебель




АППАРАТ DERMAPEN P19


ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ С ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ПРЕПАРАТА
РЕШАЕТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЦА И ТЕЛА.

СКОРОСТЬ

- Скорость работы: **8000 - 10000** колебаний в минуту.
- **5 уровней** регулировки скорости с цветовым индикатором

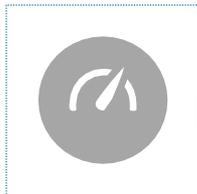

ПОДАЧА ПРЕПАРАТА
ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ

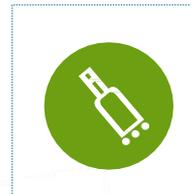


НАСАДКИ

- Стерильные одноразовые насадки из медицинской стали с 12 иглами.
- **НАНО 5D** с микроиглами длиной 0,1 мм

ДЛИНА ИГЛ

- Изменяемая длина игл
**0,25 мм, 0,5 мм,
0,75 мм, 1,0 мм, 1,5 мм,
1,75 мм, 2,0 мм**

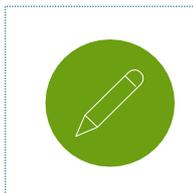

Арт. 424215

АККУМУЛЯТОР



Удобство работы
без
 сетевого шнура

Автоматическая подача игл на заданную глубину обеспечивает равномерную обработку.

DERMAPEN P19

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОЦЕДУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА **DERMAPEN P19** МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ ЛИЦА И ТЕЛА, А ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ СКАЛЬПА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ КАЖДОЙ ОБЛАСТИ.




МЕЛКИЕ И ГЛУБОКИЕ
МОРЩИНЫ




ГРАВИТАЦИОННЫЙ
ПТОЗ



ВОЗРАСТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

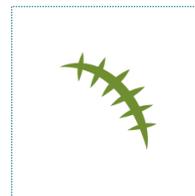


РУБЦЫ,
ШРАМЫ

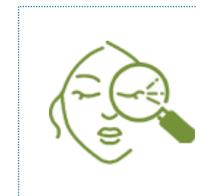


ПЕРИОРБИТАЛЬНЫЕ
МОРЩИНЫ



АЛОПЕЦИЯ

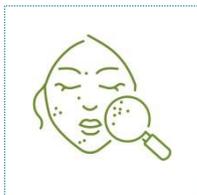

ПОСТАКНЕ

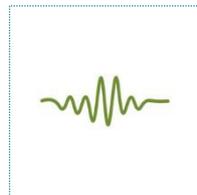

СТРИИ




ТУСКЛАЯ КОЖА,
«УСТАЛОЕ» ЛИЦО



СНИЖЕННЫЙ
ТОНУС КОЖИ




ДРЯБЛОСТЬ
КОЖИ ТЕЛА

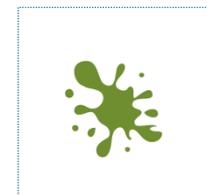


ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА


РЕАКЦИЯ КОЖИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ: ИНДУКЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

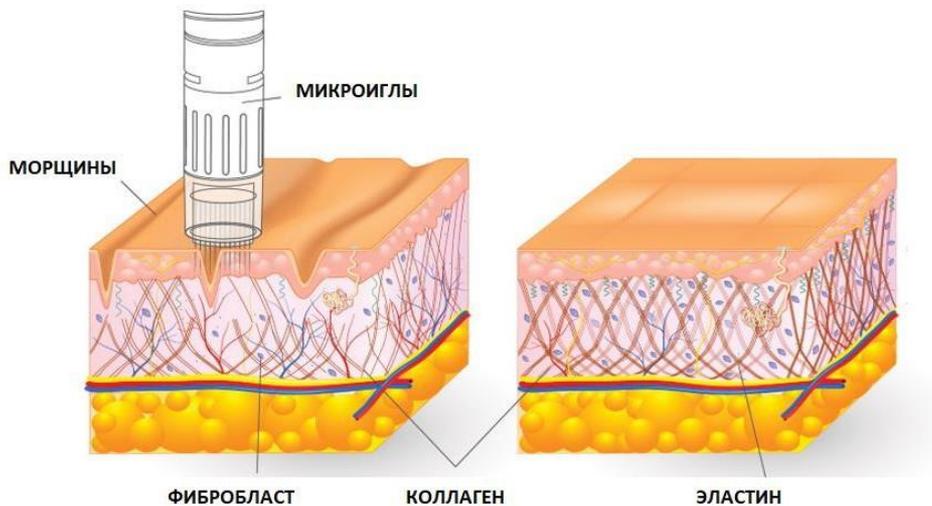


СТИМУЛЯЦИЯ
РЕГЕНЕРАЦИИ

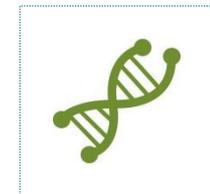

СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА
КОЛЛАГЕНА И
ЭЛАСТИНА

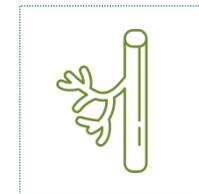

ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ
СОСУДОВ

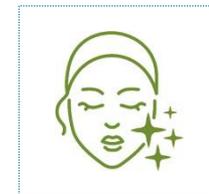


ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И УКРЕПЛЕНИЕ
КОЖИ

DERMAPEN P19


ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ


КРЕМ

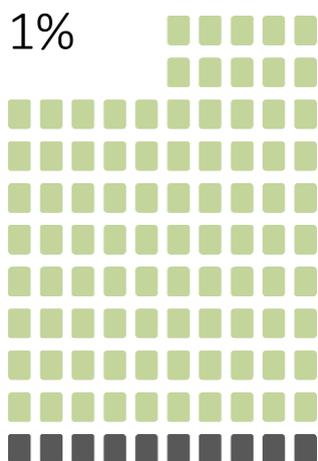


ЛИПОСОМЫ

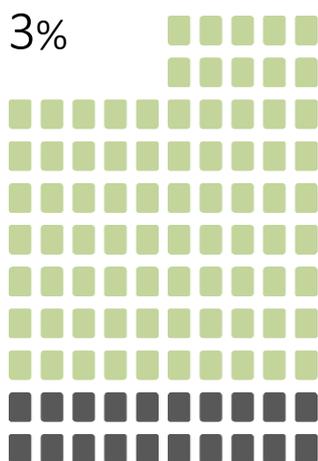

ИОНОФОРЕЗ

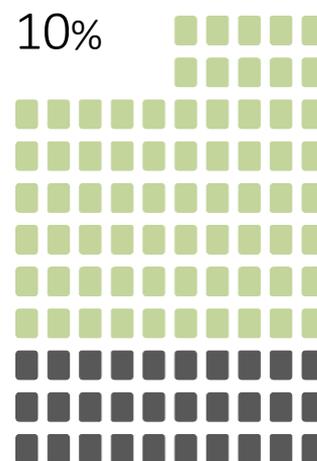

ФММТ

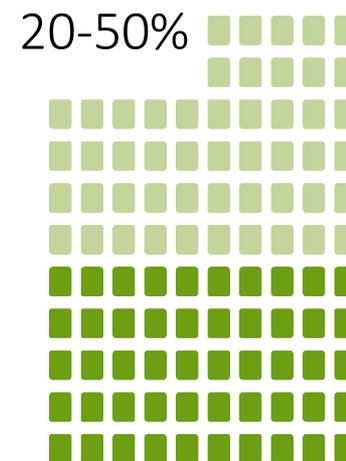

ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ МИКРОКАНАЛЫ:
УСИЛЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ В ДЕСЯТКИ РАЗ

DERMAPEN P19

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД			
	НАППАЖ	МИКРОНИДЛИНГ	ФММТ	ФММТ / DERMAPEN P19
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПРЕПАРАТА	✓	✓	✓	✓
УДОБСТВО ОБРАБОТКИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ ОБЛАСТЕЙ	✓	✓	✓	✓
МИНИМАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ	✗	✓	✓	✓
МИКРОТРАВМА, СТИМУЛИРУЮЩАЯ РЕГЕНЕРАЦИЮ	✓	✓	✓	✓
МАКСИМАЛЬНО КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ	✗	✗	✓	✓
ИЗМЕНЯЕМАЯ ДЛИНА ИГЛЫ	✗	✗	✓	✓
РАВНОМЕРНАЯ ОБРАБОТКА ЗОНЫ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ГЛУБИНУ	✗	✗	✓	✓
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ НЕСКОЛЬКИХ ЗОН ОДНОЙ ИГЛОЙ/ НАСАДКОЙ	✗	✗	✓	✓
КОРОТКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД	✗	✓	✓	✓
МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ОСЛОЖНЕНИЙ	✗	✗	✓	✓
ПОДАЧА КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ	✗	✗	✗	✓

DERMAPEN P19


ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА



КРАСНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ ПОВЫШАЕТ УСВОЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ ПОДСВЕЧИВАЕТ ЗОНУ ОБРАБОТКИ.



НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАНО 5D ИГЛ ПОВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ МИКРОПИГМЕНТИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ТОНА КОЖИ И СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА БЕЗУПРЕЧНОГО МАКИЯЖА.

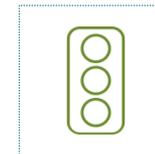

5 СКОРОСТЕЙ = 5 ЦВЕТОВ КАЖДЫЙ УРОВЕНЬ СКОРОСТИ ПОДАЧИ ИГЛ ОТРАЖАЕТСЯ В ИЗМЕНЕНИИ ЦВЕТА ИНДИКАТОРА.



АППАРАТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДАЧУ КОСМЕТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕРЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КОКТЕЙЛЯ НА ЗОНУ ОБРАБОТКИ.

DERMAPEN P19

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ: ПРОЦЕДУРЫ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ КЛИЕНТАМ С ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И ТОНКОЙ КОЖЕЙ.

ВЫГОДНО: ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИ НА ПРОЦЕДУРУ.



ПОДАЧА
КОСМЕТИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА



ТОЧНОСТЬ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ



РАБОТА ОТ
АККУМУЛЯТОРА



НА ЛЮБОМ
УЧАСТКЕ ЛИЦА И
ТЕЛА




ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ



УДОБСТВО
РАБОТЫ




ИЗМЕНЯЕМАЯ
СОКРОСТЬ
И ДЛИНА ИГЛ

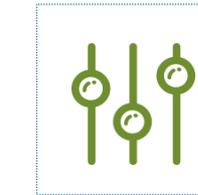

ВОЗМОЖНОСТЬ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОДАЧИ КОКТЕЙЛЯ

Арт. 424215

ВЫБОР ДЛИНЫ ИГЛ

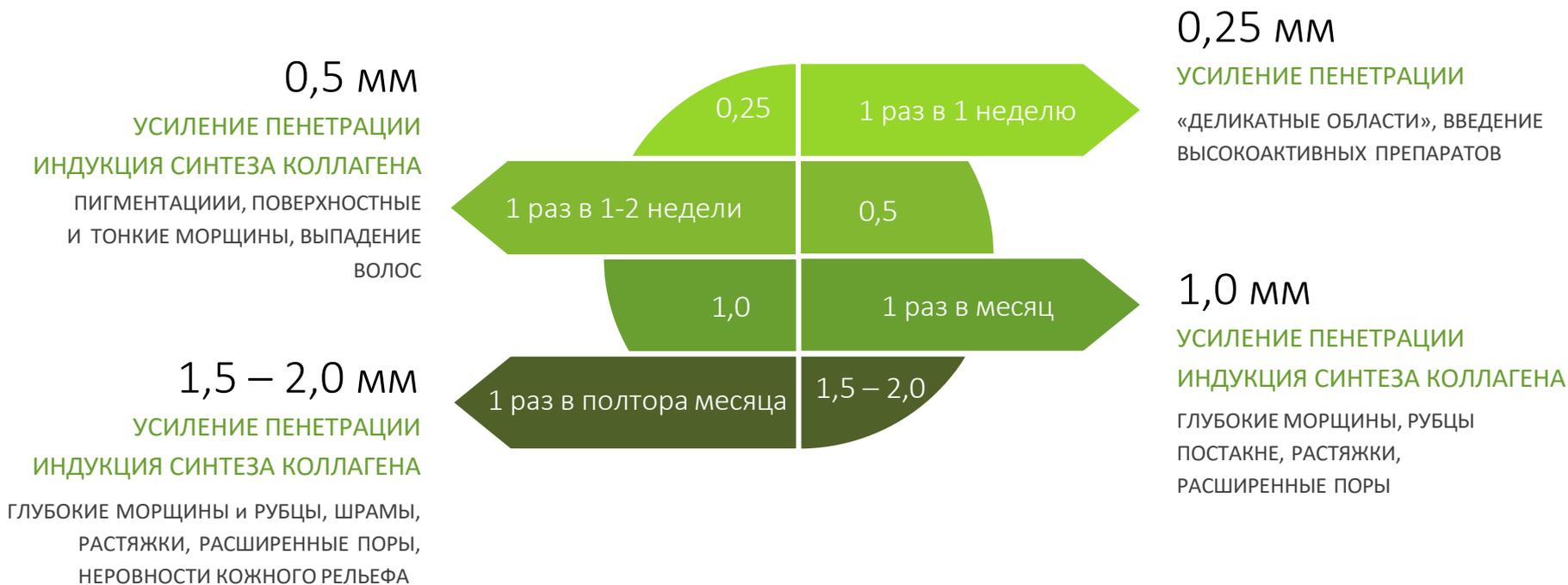

DERMAPEN P19

НАСАДКИ К АППАРАТУ



НАСАДКА ДЛЯ DERMAPEN P19 12 ИГЛ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ СТАЛИ

Имеет специальное отверстие для соединения со шлангом подачи препарата.

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ: 12

ТОЛЩИНА ИГЛ: 0,25 мм

МАТЕРИАЛ ИГЛ – хирургическая сталь с алмазной заточкой.

Области применения: лицо, тело, волосистая часть головы



НАСАДКА ДЛЯ DERMAPEN P19 НАНО 5D

Имеет специальное отверстие для соединения со шлангом подачи сыворотки. Предназначена для вбивания в кожу косметических препаратов.

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ: 70

ТОЛЩИНА ИГЛ: 0,2 мм

ДЛИНА ИГЛ: 0,1 мм

МАТЕРИАЛ ИГЛ – хирургическая сталь

Области применения: лицо, декольте, руки, волосистая часть головы



СОЕДИНЕНИЕ СО
ШЛАНГОМ ПОДАЧИ
КОСМЕТИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА

DERMAPEN P19

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУР / ЛИЦО / ТЕЛО



ЛИФТИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Арт. 424114, 5 мл x 10 штук

ПОКАЗАНИЯ

- Дегидратация, шелушение, дискомфорт и мелкие морщинки, вызванные недостатком влаги.
- Бледный, тусклый и неровный цвет лица, пигментация.
- «Стрессовая, уставшая кожа» (при хронической усталости, жители мегаполисов, курильщики).
- Коррекция возрастных изменений (морщины, дряблость, снижение тургора, упругости кожи).
- Профилактика преждевременного старения.



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ «EXOSOMES»

Арт. 424185, 5 мл x 10 штук

ПОКАЗАНИЯ

- Снижение упругости, эластичности и тонуса кожи;
- Неровный микрорельеф и тон;
- Следы постакне;
- Признаки фотостарения;
- Тусклый цвет лица;
- Сухость, шелушение, ощущение стянутости;
- Признаки стресса и усталости;
- Нарушение барьерной функции;
- Воздействие агрессивных факторов окружающей среды;
- Профилактика раннего старения.



УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЛИФТИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПОД ДЕРМАПЕН ДЛЯ ТЕЛА "BODY FIT"

Арт. 424152, 4 мл x 6 штук

ПОКАЗАНИЯ

- Атония и снижение тургора кожи тела, дряблость
- Растяжки различной локализации, а также проблемы, возникшие в результате уменьшения объемов тела за короткий промежуток времени
- Инволюционные изменения кожи тела и декольте, кожные заломы
- Поствоспалительная пигментация, рубцы и шрамы, неравномерное окрашивание кожных покровов

DERMAPEN P19

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУР / ЛИЦО



АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ «MULTI PLANT STEM ANTI AGING SERUM»

Арт. 424172, 3 мл x 10 штук

ПОКАЗАНИЯ

- Снижение биомеханических показателей при фото-хроно-старении; инволюционные признаки, дегидратация.
- С целью профилактики фото-старения и раннего старения в условиях неблагоприятной экологии; кожа курильщика; жители мегаполисов и крупных промышленных зон.
- Для коррекции поверхностных кожных дефектов, расширенных пор.



ЛИФТИНГ СЫВОРОТКА ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ «PRO- XYLANE HYDRO LIFT SERUM»

Арт. 424173, 3 мл x 10 штук

ПОКАЗАНИЯ

- Признакиптоза и инволюционные изменения; снижение биомеханики; хроно-старение.
- При провисании в нижней и средней трети, потере четкости овала.
- Дегидратация, возрастные морщины и линии дефицита влаги.
- Для улучшения внешнего вида и состояния кожи, восстановления тургора и эластичности.



СЫВОРОТКА ПРОТИВ АКНЕ ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ «BIONATURAL ANTI ACNE SERUM»

Арт. 424174, 3 мл x 10 штук

ПОКАЗАНИЯ

- При повышенной секреции себума; расширенных порах, закупорке выводящих протоков сальных желез. Жирная себорея, в том числе на коже в области спины, груди.
- Для коррекции состояния проблемной кожи; комедональная форма акне; поствоспалительная пигментация.
- Для выравнивания микрорельефа, снижения раздражения; коррекции себорейного дерматита.
- С целью профилактики рецидивов воспаления.

ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС PEPTIDERM 5 АКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ



6 x 5 мл, арт. 424146


ФОРМУЛА ПРОДУКТА ОКАЗЫВАЕТ МНОГОУРОВНЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ, СОКРАЩАЯ ВИДИМЫЕ ПРИЗНАКИ ВОЗРАСТА. ПРЕПАРАТ УЛУЧШАЕТ БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОЖИ, УСТРАНЯЕТ НЕДОСТАТОК ВЛАГИ, РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ И ЗАМЕДЛЯЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ МИОРЕЛАКСИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ.

Выпускается в стерильном запечатанном флаконе и предназначен для однократного использования.

ПОКАЗАНИЯ:

- Инволюционные изменения: атония, снижение тургора, упругости и эластичности кожи. Хроно- и фото-старение.
- Морщины глубокие и мелкие, профилактика
- Замедление регенеративных процессов, истончение и тусклый цвет кожных покровов. Стрессированная кожа
- Профилактика раннего старения.

Также, использование препарата показано для восстановления состояния кожных покровов при хронической усталости, для жителей областей с неблагоприятной экологией, курильщиков, чья кожа находится в состоянии оксидативного стресса.

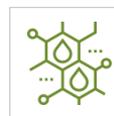


ПЕПТИСКИН
(PEPTISKIN)



ТРИПЕПТИД
МЕДИ -1



ПЕПТИДЫ
ОВСА

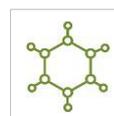

СИН КОЛЛ
(SYN®-COLL)



СИН ЭЙК
(SYN-AKE)



СЕРИЦИН

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС УХОДА ЗА УВЯДАЮЩЕЙ КОЖЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 10 – 12 ПРОЦЕДУР.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КУРС СОСТАВЛЯЕТ 5 – 7 ПРОЦЕДУР.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ ПРОЦЕДУРУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСА PEPTIDERM 5 ОДНОЙ ИЗ СТЕРИЛЬНЫХ ШЕЛКОВЫХ МАСОК PEPTIDERM.

ПЕПТИДНАЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА "PEPTIDERM - АКТИВНЫЙ КОМФОРТ"

•••••

- ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ
 - РАЗДРАЖЕННАЯ, СТРЕССОВАЯ КОЖА
- ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИЕЙ
 - ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТИЧЕСКИХ И ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- ДЛЯ БЫСТРОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИЕЙ (СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ, ВЕТЕР, МОРОЗ).



424144 – упаковка 5 штук

- Стерильная шелковая маска, пропитанная активным раствором, каждая в отдельном саше.
- Для однократного применения.
- Уменьшает воспалительный каскад и устраняет раздражение, отечность, красноту, минимизирует жжение, покалывание и дискомфорт
- Эффективна для любого типа кожи


Пептид Найтразен, аминокислоты кератина, аллантаин.

- Стерильная шелковая маска, пропитанная активным раствором, каждая в отдельном саше.
- Для однократного применения.
- Комбинация биомиметического пептида и аминокислотного комплекса восстанавливает биомеханические свойства кожи
- Эффективна для любого типа кожи



424145 – упаковка 5 штук

Пептид Колларен, аминокислоты кератина, аллантаин, дикалий глицирризинат

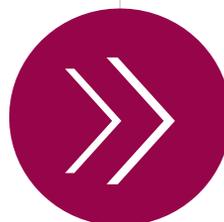


ПЕПТИДНАЯ АНТИ-ЭЙДЖ МАСКА "PEPTIDERM - АКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ"

•••••

- ИНВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ПРИЗНАКИ ФОТО-СТАРЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ МОРЩИН
- АТОНИЯ, ПОТЕРЯ УПРУГОСТИ, ЭЛАСТИЧНОСТИ И ТУРГОРА
- НЕДОСТАТОЧНАЯ УВЛАЖНЕННОСТЬ, СУХОСТЬ И ДИСКОМФОРТ
- ИСТОНЧЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ И СНИЖЕНИЕ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ
- СТРЕССОВЫЕ СОСТОЯНИЯ КОЖИ, ВЫЗВАННЫЕ УФ ИЗЛУЧЕНИЕМ И ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

DERMAPEN P19

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД

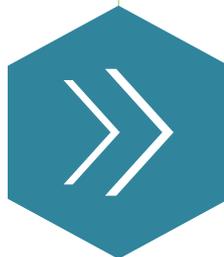

ИНТЕНСИВНО РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ПОКАЗАНИЯ

- После процедур мезотерапии и биоревитализации
- После процедур микроидлинга и ФММТ
- После микродермабразии и лазерной шлифовки
- После химического пилинга
- При повреждении кожи факторами внешней среды (солнце, холод, ветер)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стерильная маска из биоцеллюлозы, пропитанная активным раствором, каждая в отдельном саше.
- Для однократного применения.
- Быстрое успокаивающее и противоотечное действие
- Эффективна для любого типа кожи

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Экстракт центеллы азиатской, бета глюкан, ацетил тетрапептид – 5, экстракт ромашки лекарственной.

424150PRO – упаковка 5 штук

DERMAPEN P19

РЕЗУЛЬТАТЫ


СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС
ЗАМЕДЛЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ

УМЕНЬШЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ РУБЦОВЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПОСТАКНЕ
СУЖЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР
ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА, ТУРГОРА
КОЖИ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ И ШРАМОВ

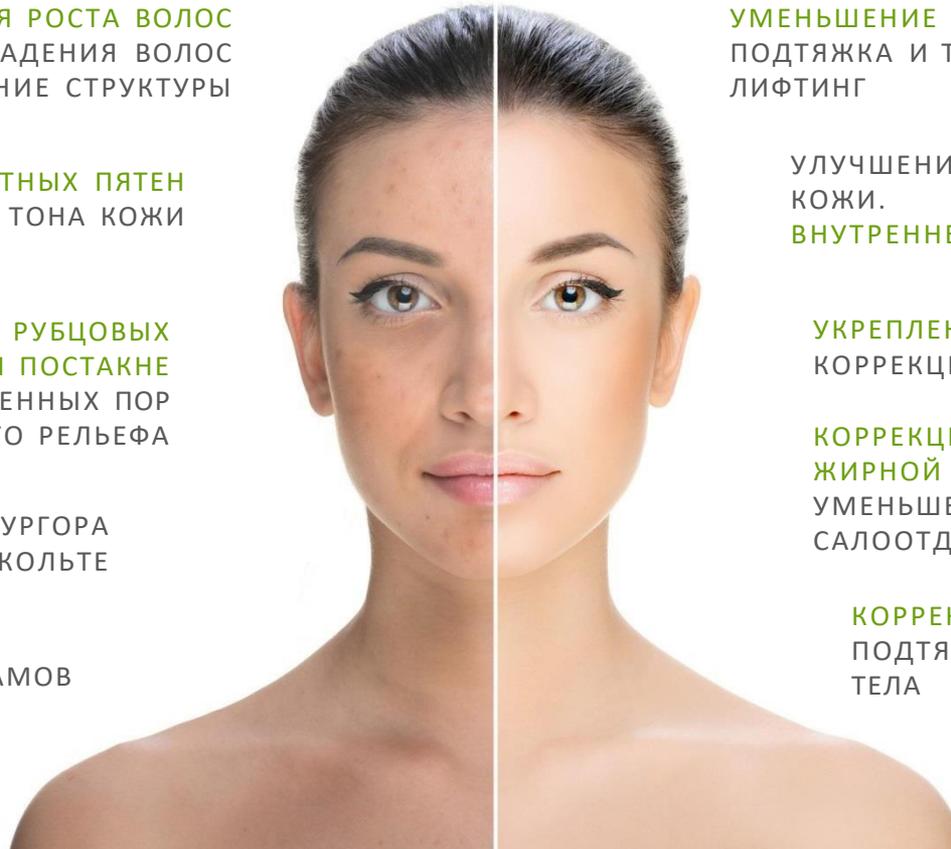

УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
ПОДТЯЖКА И ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ
ЛИФТИНГ

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ТОНА
КОЖИ.

ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ

УКРЕПЛЕНИЕ КОНТУРОВ ЛИЦА,
КОРРЕКЦИЯ ВТОРОГО ПОДБОРОДКА

КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ
ЖИРНОЙ КОЖИ
УМЕНЬШЕНИЕ
САЛООТДЕЛЕНИЯ

КОРРЕКЦИЯ СТРИЙ.
ПОДТЯЖКА И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ
ТЕЛА



Мы следуем за гениальными идеями, объединяя наш опыт за многие годы с технологиями сегодняшнего дня.



Испания,
Год основания: 2002
Площадь производства:
5 000 м²

О КОМПАНИИ MESODERM

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ИСПАНСКОЙ КОМПАНИИ MESODERM ОБЪЕДИНИЛИ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ С ПРИНЦИПАМИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ОТОБРАННОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.


КАЧЕСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА ИСПОЛЬЗУЮТ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ GMP, ТРЕБОВАНИЯМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.



mesoderm

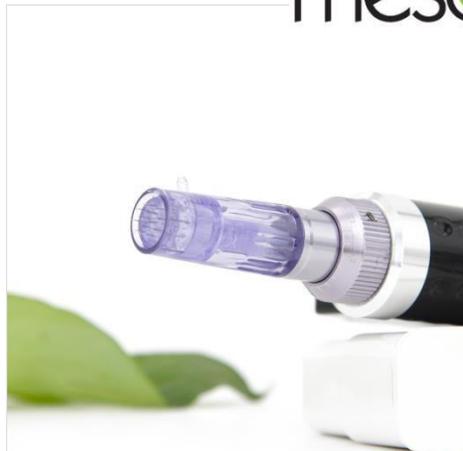

 **SMARTBUY**
профессиональная косметика • оборудование • мебель



МОСКВА 7 (495) 565-38-74, РЕГИОНЫ 8 (800) 775-82-76 (звонок бесплатный)



www.smartbuy.ru